

AIR DOCTOR

Nerve & Muscle Stimulator
Model: YW-5000

MADE IN KOREA

TENS
STIMULATOR



دستگاه محرک اعصاب

مجهز به ۲ خروجی مجزا و ۴ پد

دستور مصرف:


- + پدها را در ابتدا و انتهای عضلات قرار دهید.
- + دستگاه را روشن نمایید.
- + نوع برنامه خروجی (signal) مورد نظر را انتخاب نمایید.
- + با دکمه ولوم میزان شدت فرکانس را تا میزان دلخواه افزایش دهید.
- + قبل از استفاده میبایست از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- + در زمان اتصال پدها به بدن حتما دقت فرمایید بین پدها حداقل ۲ سانتیمتر فاصله باشد.

در موارد زیر قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید:



- + زنان باردار
- + بیماران با بیماریهای قلبی و یا با باتری قلب
- + کودکان زیر ۱۴ سال
- + بیماران با تب شدید و یا تومورهای بد خیم
- + افرادی که دچار خونریزی در نواحی زخم هستند.

موارد احتیاطی:

- + در طی روز یک یا دو بار و هر دفعه نهایتا تا ۳۰ دقیقه استفاده نمایید.
- + افرادی که دچار ضعف هوشیاری هستند نباید از این دستگاه استفاده نمایند.
- + هرگز دستگاه را برای نواحی اطراف قلب و بالاتر از سر و گردن استفاده نشود.
- + از استفاده محصول در حمام و هنگام رانندگی خودداری نمایید.
- + معلولین تنها با نظارت مراقبین خود از دستگاه استفاده نمایند.
- + در صورت بروز هر گونه خرابی تنها با بخش خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید و از تعمیر خودسرانه جدا خودداری کنید.
- + از قرار دادن پدها بر روی جای زخم، خراش و یا بریدگی جدا خودداری فرمایید.

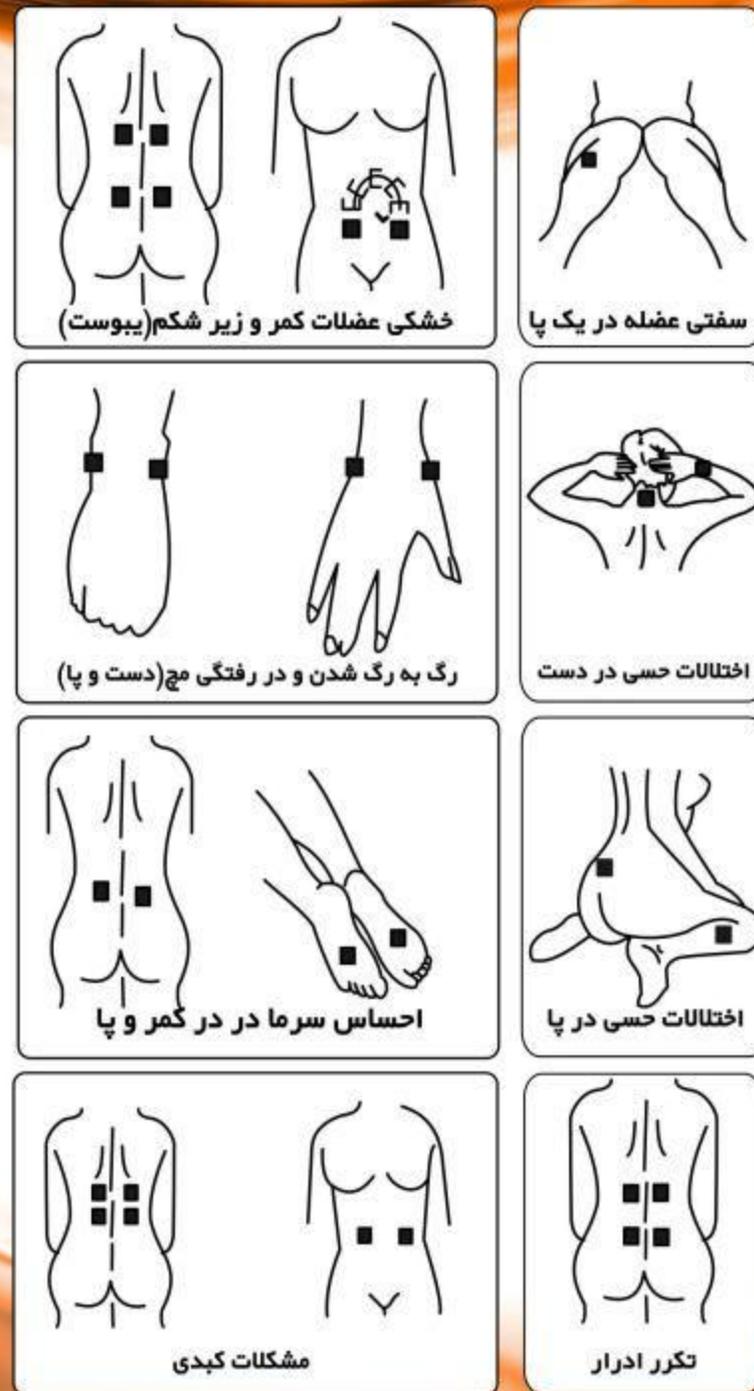

معرفی دکمه ها و عملکرد دستگاه :

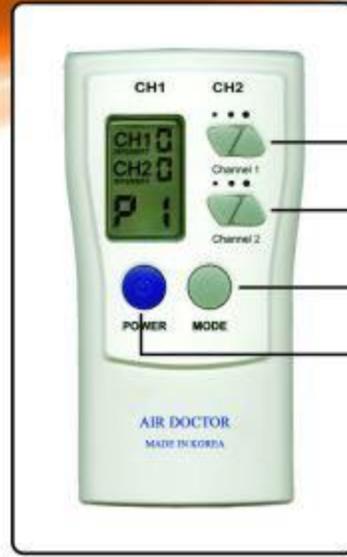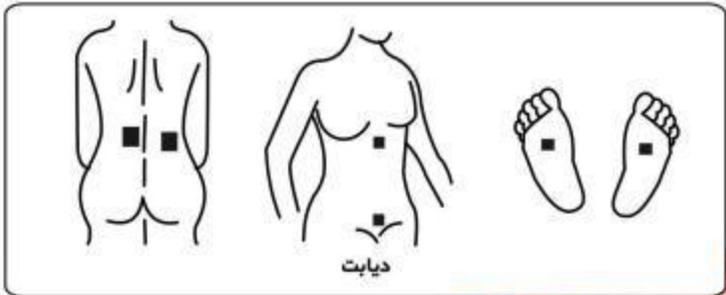

دکمه ولوم الکتروود کانال ۱

دکمه ولوم الکتروود کانال ۲

دکمه تغییر نوع برنامه خروجی

دکمه روشن - خاموش

وزن : ۱۱۰ گرم



مصرف برق : ۹۰ میلی آمپر

اندازه : ۶۰x۱۲۰x۱۷ mm

میزان فرکانس : ۲-۱۷۸ Hz

باتری : ۲ عدد نیم قلمی

محل قرار گرفتن پدها در وضعیت های مختلف :

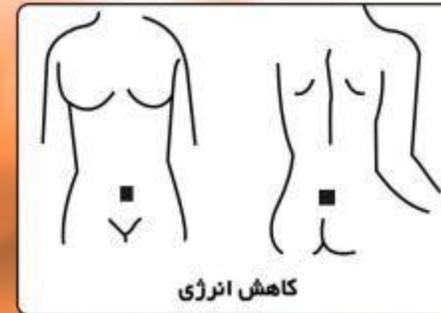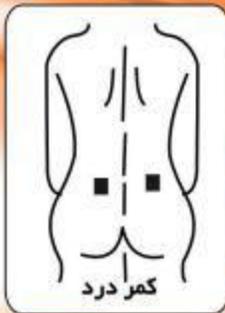

عضلات و اندامهای بدن انسان توسط جریانهای الکتریکی سیستم عصبی کنترل میشوند. زمانی که بدن در شرایط بد و نامطلوبی قرار می گیرد، در سیستم عصبی اختلالاتی ایجاد میگردد که بخشی از آن به شکل احساس درد بروز می نماید.

اکنون ما با دانستن این موضوع از این ویژگی در جهت مخالف بهره جسته ایم. بدین معنی که جریانی مشابه ایجاد کرده ایم تا گرفتگی خستگی و درد را بهبود ببخشیم.

مشخصات :

سبک با قابلیت حمل آسان

کوچکترین دستگاه تنس فیزیو تراپی خانگی

کاهش دردهای متعاقب سدمات و ضایعات ورزشی، مزمن و مداوم مثل کمر درد، سردرد و...

کاهش دردهای عصبی

کاهش اسپاسم

کاهش دردهای متعاقب اعمال جراحی

موثر در بازگشت فعالیت مجدد نقاط کم تحرک

تقویت کننده، سفت کننده و شکل دهنده عضلات بدن

دارای ۱۶ برنامه با ۹ مود شدت

قابل استفاده برای ۲ نفر و یا ۲ عضو به صورت همزمان

خروجی سیگنال از ۲-۱۷۸ Hz

توضیحات شدت مود ها :

P1	انواع جریان	P9	تغییر ماساژ متوسط به فرکانس ۲
P2	جریان P5-P8	P10	تغییر ماساژ متوسط به فرکانس ۴
P3	جریان P9-P12	P11	تغییر ماساژ متوسط به فرکانس ۶
P4	جریان P13-P16	P12	تغییر ماساژ متوسط به فرکانس ۸
P5	تغییر ماساژ به فرکانس ۲۰	P13	ماساژ بسیار قوی تا فرکانس ۷۰
P6	تغییر ماساژ به فرکانس ۳۰	P14	ماساژ بسیار قوی تا فرکانس ۹۰
P7	تغییر ماساژ به فرکانس ۴۰	P15	ماساژ بسیار قوی تا فرکانس ۱۲۰
P8	تغییر ماساژ به فرکانس ۵۰	P16	ماساژ بسیار قوی تا فرکانس ۱۵۰