



FLÄCHEN-
DESINFIZIATIONSMITTEL

Lysoformin® spezial


کنسانتره ضد عفونی کننده سطوح و کف



CE 0482

Lysoformin Spezial

کنسانتره تمیز کننده و ضد عفونی کننده کف و سطوح

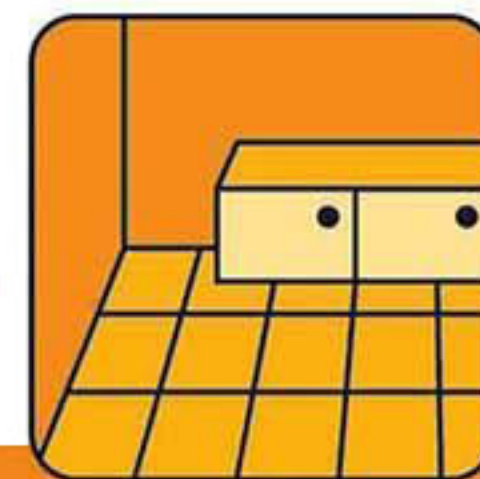

ترکیبات:

هر ۱۰۰ گرم محلول حاوی ۸/۹ گرم پلیهگزا متیلن بیگوانید هیدروژن کلراید، ۲/۲۳ گرم بیس-۳- (آمینوپروپیل) دودسیلامین، ۵ گرم دیدسیل دیمتیل آمونیوم کلراید

طیف اثر:

ضد باکتریها شامل Tb، ضد عفونتهای ویروسی (عفونتهای بیمارستانی)، ویروسهای پوششدار (HBV/HCV/HIV) Papovavirus

ویژگیها:

- کنترل باکتریها از جمله Tb، ویروسها
- فاقد ترکیبات فسفات، آلدهاید، فرمالدهاید، فنل و اکسیدانها
- سازگاری بالا با انواع ابزار، آندوسکوپهای منعطف، سطوح و تجهیزات
- ضد عفونی کنندهایی با طیف گسترده مصرف برای سطوح و تجهیزات
- با ماندگاری ۱۴ روزه پس از رقیق سازی
- تمیز کننده بدون نیاز به استفاده از دترجنت و فعال کننده
- مقاوم در برابر سختی آب
- فاقد بوی ماندگار
- ثبت شده در لیست VAH کشور آلمان

روش مصرف:

Lysoformin Spezial کنسانتره مایعی است که با افزودن مقداری آب در دمای اتاق قابل رقیق سازی است. حتما از ظرف مدرج برای فرآیند رقیق سازی استفاده شود. هنگام رقیق سازی ابتدا ظرف مورد نظر را از آب پر کرده و سپس کنسانتره Lysoformin Spezial را به میزان لازم به آن اضافه نمایید. جهت اثرگذاری بهتر توصیه میشود محلول را زمانی کوتاه قبل از مصرف، تهیه نمایید. محلول آماده شده تا دو هفته خواص فیزیکی شیمیایی خود را حفظ میکند به شرط آنکه از ورود آلودگیهای ارگانیک به آن جلوگیری شود. (طبق توصیه انستیتو Robert-Kock برلین / (Federal Health Gazette)



هشدارها:

- در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
(در محلی با تهویه مناسب نگهداری شود).
- دور از دسترس کودکان باشد.
- هنگام رقیق سازی و کاربری، حتما از تجهیزات محافظ مانند دستکش و عینک استفاده نمایید.
- در هنگام جابجایی، تهیه و مصرف از دستکش استفاده شود.
- به زمان انقضاء دقت شود و پس از آن به هیچ عنوان مصرف نشود.
- اضافه کردن دترجنت به محلول ممکن است باعث خنثی شدن اثر محلول شود.
- در صورت استنشاق و نوشیدن ممکن است نایر غیر قابل جبران داشته باشد.
- در صورت تماس با چشم بلافاصله با مقدار زیادی آب شستشو دهید و سپس به پزشک مراجعه نمایید.
- در صورت داشتن احساس ناراحتی بر روی پوست در هنگام استفاده از محلول، به پزشک مراجعه نمایید.
- (در صورت امکان برچسب محلول را به پزشک ارائه دهید)



سایزها و بسته بندیهای استاندارد:

- لیتر ۲×۵ گالن
- ۱۲×۱۰۰۰ CC بطری
- ۲۰×۲۰۰ CC بسته کوچک

طیف اثر	غلظت	زمان تماس
کنترل عفونت بیمارستانی	2%	۵ دقیقه
	1%	۱۵ دقیقه
ویروسهای پوشش دار شامل HBV/HCV/HIV Rota Virus Polyomavirus(SV40) Norovirus(MNV)	0/5%	۱۵ دقیقه
	0/5%	۵ دقیقه
	0/5%	۳۰ دقیقه
	2%	۲۰ دقیقه

Mahan Teb Asre Novin Co.

No. 16 Ramin St. South Shams Tabrizi Ave. Mirdamad Blv.
Tehran-IRAN

Tel: (+98) 21 26645281 - 84
www.MahanMedical.com

Fax: (+98) 21 22274703
info@MahanMedical.com